

RESULTADOS Y EFICACIA

LINFOPRESS
EVOLUTION PRO

Los resultados obtenidos tras el estudio realizado revelan la efectividad del tratamiento con LINFOPRESS EVOLUTION PRO para

DRENAJE LINFÁTICO Y CIRCULATORIO

TRATAMIENTOS
REDUCTORES

REMODELACIÓN
CORPORAL

POST-LIPOSUCCIÓN

TERAPIA *de*
COMPRESIÓN
AVANZADA

PRE-LIPOSUCCIÓN

PIERNAS CANSADAS

ANTI-CELULÍTICOS

DATOS TÉCNICOS

LINFOPRESS
EVOLUTION PRO

Ref. M86



Tensión alimentación:	230 V a.c 50/60 Hz 115V a.c 50/60 Hz (opcional)
Consumo máximo:	180VA (0,75A a 230Vac)
Características de salida:	Presión máxima en cada salida: 80 mmHg
Número de cámaras / prenda:	chaqueta 24 pantalón 24
Tiempo de presión :	0,5 - 25 seg
Tiempo de tratamiento:	20/30/45 min aproximado
Clasificación:	Clase I tipo BF
Fusibles de protección:	2 x T1,5A / 250 VAC
Grado de protección:	IPX0
Interface:	Pantalla color 10.2" Touch Screen Backlight LED

Dimensiones del equipo:	50 cm (h) x 44 cm (l) x 50 cm (a)
Peso del equipo:	18 Kg

TERMO SALUD

ACCESORIOS INCLUIDOS



1 x
PANTALÓN
PRESOTERAPIA
REF: A0151



1 x
CHAQUETA
PRESOTERAPIA
(opcional)
REF: A0150



1 x
CABLE
ALIMENTACIÓN
REF: SUB-221



1 x
CONTROL
REMOTO
REF: A430

Termosalud SL se reserva el derecho a realizar las modificaciones que considere oportunas por motivos de fabricación, en cuanto a diseño, medidas, referencias y características técnicas incluidas en este catálogo.



PRESOTERAPIA



ISO 13485
certificata:
0199.2018



Fondo Europeo de Desarrollo Regional
UNIÓN EUROPEA



Asturias
País de Europa



IDEPA

© 2020 Termosalud. Depto. de Marketing

TERMO SALUD | MEDICAL & ESTHETIC

TERMO SALUD | MEDICAL & ESTHETIC

P. Ind. Los Campones. c/ Ataulfo Frieria Tarfe nº 8. Gijón. ASTURIAS
tel. +34 985 167 547 · info@termosalud.com · www.termosalud.com



LINFOPRESS
EVOLUTION PRO

terapia de compresión *avanzada*

TERMO SALUD | MEDICAL & ESTHETIC



¿CÓMO ACTÚA LINFOPRESS EVOLUTION PRO?

LINFOPRESS EVOLUTION PRO es el resultado de la experiencia de Termosalud durante más de 30 años en el desarrollo de equipos de presoterapia altamente eficaces en el tratamiento de problemas linfáticos y circulatorios.

Actúa en la parte inferior del tronco, extremidades inferiores y abdomen.

Y gracias a la incorporación de una chaqueta neumática, también en la zona superior lumbar, torácica, dorsal, abdominal y extremidades superiores.



INDICACIONES

LINFOPRESS EVOLUTION PRO contribuye a mejorar diversas alteraciones médico-estéticas mediante el estímulo de la circulación sanguínea y linfática. Es el complemento ideal en tratamientos estéticos destinados a problemas muy concretos como la celulitis, trastornos de la obesidad, circulatorios y varicosos o de retención de líquidos y edemas.

Igualmente, es efectivo en tratamientos postoperatorios y en la preparación y recuperación quirúrgica, postparto, molestias musculares, articulares y correcciones posturales; así como en estados de estrés, insomnio y ansiedad.

BENEFICIOS

- Estimula los sistemas circulatorio y linfático, de forma sencilla, rápida y eficaz.
- Mejora la circulación y atenúa la sensación de pesadez y cansancio de piernas.
- Favorece la eliminación de toxinas de forma natural y, por ello, es el complemento ideal de los tratamientos reductores y anticelulíticos.
- Reduce la hinchazón y ayuda a eliminar líquidos.
- Es ideal para la remodelación corporal.
- Contribuye a mejorar el flujo sanguíneo y, en consecuencia, el tono y la firmeza de la piel.
- Es indoloro y no invasivo.

OBJETIVO DE LA PRESOTERAPIA

El objetivo de **LINFOPRESS EVOLUTION PRO** es garantizar el bienestar terapéutico para el organismo, estimulando el sistema circulatorio y linfático en cada zona corporal de forma específica y eliminando el exceso de fluidos intersticiales superfluos, relajando el cuerpo y consiguiendo con ello la mejora del bienestar:

MODO DE ACCIÓN DE LA PRESOTERAPIA

Está constituido por un conjunto de prendas neumáticas que se adaptan al área y volumen de la zona a tratar. Además, gracias a su método de compresión intermitente, la presión se ajusta a cada región corporal.

Nuestro equipo realiza compresiones alternas sobre los diferentes puntos del cuerpo, para calmar y corregir las alteraciones provocadas por un mal funcionamiento de los sistemas linfático y circulatorio.

LINFOPRESS PRO, SISTEMA DE CELDAS SUPERPUESTAS

Las celdas de presión de **LINFOPRESS EVOLUTION PRO** están distribuidas de una forma superpuesta, un sistema que permite la compresión de todas las zonas del organismo para garantizar un drenaje más completo. La disposición oblicua de las celdas permite el desvío de la linfa de manera horizontal y ascendente, empujándola y guiando su recorrido hacia los puntos ganglionares del organismo, evitando su dispersión hacia otros conductos.

El diseño del pantalón **LINFOPRESS EVOLUTION PRO** se adapta por completo a la zona de tratamiento, desde los pies hasta el abdomen, para ejercer una presión uniforme sobre toda la superficie. El pantalón está formado por 24 cámaras de aire, que se distribuyen de forma uniforme por toda la zona de tratamiento. Dispone de un sistema de cierre por cremalleras adaptables en función del cuerpo y contorno del paciente, que permite además utilizar extensores para ensancharlo si es necesario.

LINFOPRESS EVOLUTION PRO incorpora una chaqueta específica para el tratamiento en brazos, espalda, torax y abdomen que potencia la eficacia de la presoterapia en el tratamiento integral. Equipo adaptado para el sector médico, cumple con todas las expectativas del paciente y el profesional médico estético, al permitir pausar o reanudar el tratamiento y saltar o anular celdas durante el mismo.



CICLOS DE TRABAJO LINFOPRESS PRO

LINFOPRESS EVOLUTION PRO dispone de cuatro ciclos preestablecidos:

• Pre-Treatment.

Destinado a abrir de las vías linfáticas. Siempre debe anteceder a los demás ciclos y es muy útil en el tratamiento de celulitis o edemas linfáticos.

• Wave

Aplica una secuencia de compresión que hace avanzar la linfa en la zona a tratar (compresión peristáltica), de distal a proximal y de forma progresiva sobre todas las cámaras. El efecto masaje conseguido es adecuado para el tratamiento de celulitis, masaje deportivo, pre-liposucción y relajación muscular.

• Relaxing


Trabaja sobre cada cámara durante un tiempo constante. Es ideal para finalizar tratamientos de celulitis o edemas, piernas cansadas, post-liposucción, embarazo y post-parto, menopausia, etc.

• Lymphatic

Realiza olas completas de distal a proximal, en las que la presión va disminuyendo conforme la ola se aproxima a la zona proximal (cistema de Pequet y al corazón). Permite la edición de la presión por cámaras de forma individual. Es idóneo para el tratamiento de edemas linfáticos.

PRESOTERAPIA

- desvío de la linfa
- puntos ganglionares

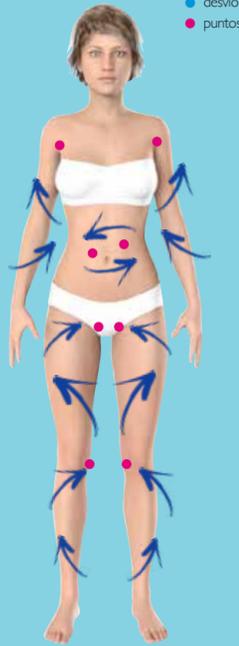

MODOS DE TRABAJO LINFOPRESS EVOLUTION PRO

MODO PROGRAMA

La combinación de estos cuatro ciclos da lugar a una gran variedad de tratamientos médico-estéticos, cada uno de los cuales está indicado para tratar un problema concreto: celulitis, retención de líquidos, flacidez, circulación, linfático, post-parto, pre y post liposucción, entre otros.

La selección de programas se realiza de forma muy sencilla, a través de un sistema operativo muy práctico y fácil de manejar; que indica, en cada una de sus secciones, los pasos a seguir para garantizar una correcta programación.

Cada uno de ellos se puede configurar para las distintas fases que integran la presión, la velocidad, la duración de paso entre cámaras y el tiempo de pausa entre ciclos.

En el caso de la fase Lymphatic, la configuración de la presión se podrá realizar de forma independiente para cada cámara.

MODO LIBRE

A partir de la combinación de los cuatro ciclos preestablecidos se pueden elaborar hasta diez tratamientos personalizados, para adaptarse mejor a las necesidades específicas de cada cliente. Además, estos tratamientos pueden grabarse en la memoria del equipo, asignándoles un nombre para identificarlos. Al igual que en programas personalizados, se podrán configurar todos los parámetros de tratamiento para cada ciclo que integre el programa.